


故障かな？と思ったら


●「故障かな？」と思ったらまずこの章をご覧ください。
処置が必要な場合は、お求めの取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。
詳しくはアフターサービス(P.11)をご確認ください。

⚠ 注意



必ず実行

水漏れが発生したときは、止水栓を閉めて給水を止める

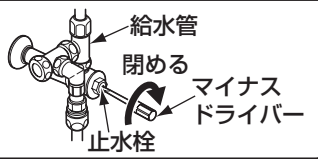

■修理を依頼される前に次のことを確認してください。

| 現象 | 確認事項 | 処置 |
|--------|------------------------------|---|
| 全く動かない | 電源コードのプラグがコンセントから抜けていませんか？ | 電源コードのプラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 |
| | 停電したり屋内のブレーカーが切れていませんか？ | 停電が復帰するまでお待ちください。またはブレーカーを「入」にしてください。 |
| | リモコンのプラグが外れかかっているか、外れていませんか？ | リモコンのプラグを本体の後方についているコントローラーボックス下部にしっかり差し込んでください。円柱状の突起部を丸穴に差し込みます。(P.4参照) |
| | 連続で動かし続けませんでしたか？ | モーターの保護のため、連続で動かし続けることはできません。1時間程度ご使用をお控えください。 |
| | 異常を検知して安全装置で停止した可能性があります。 | 電源プラグを抜き、約30秒後に再度差し込んでください。同じ現象を繰り返すときは故障の可能性があります。 |




停電時や故障時の便座の下げかた

用を足せない位置でトイレリフトが動作しなくなった場合、次の手順でアクチュエーターを取り外すと、トイレリフトを一番下まで下げることができます。

1. 電源プラグをコンセントから抜く。
2. 水はねガードを取り外す。
3. (ウォシュレットの場合)ホースクランプからホースを取り外す。
4. カバー固定ピン2個を外して本体カバーを外す。外しかたはP.8周辺器具のお手入れ、止水栓の操作についてをご確認ください。
5. クリップリングを取り外す。


⚠ 警告



禁止

緊急時以外はアクチュエーターの取り外しは行わない
手や指をはさみけがをする原因になります。

ポイント ラジオペンチなどの工具を使用すると、外しやすいです。

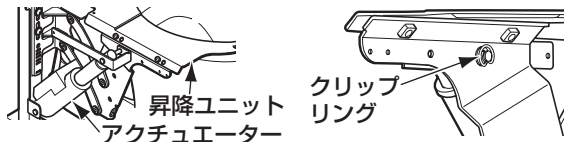


6. 昇降プレートを支えながらアクチュエーターピンを引き抜いて左右2つのアクチュエーターを外す。

注意 ピンを外すと便座が急に下がりますので、手や指を挟まないように注意してください。


ポイント ダンボール箱などを便器の上に置くと昇降プレートを支えやすいです。

7. 昇降プレートをゆっくり一番下まで下げる。

注意 一番下まで下げたときに、便器と昇降プレートの間で手や指を挟まないように注意してください。

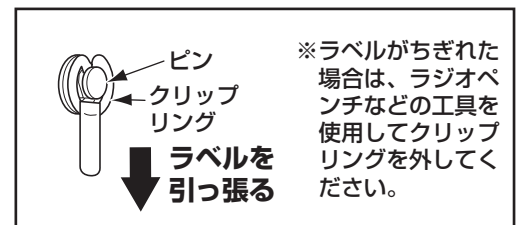

※ラベルがちぎれた場合は、ラジオペンチなどの工具を使用してクリップリングを外してください。

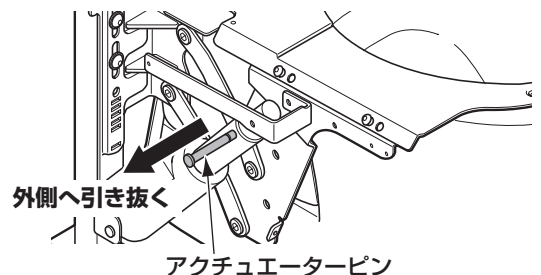

8. お求めの取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼する。